

# 数智医疗影像平台

## API 文档



腾讯云

**【 版权声明 】**

©2013–2024 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 商标声明 】**

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

**【 服务声明 】**

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。

**【 联系我们 】**

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或 95716。

## 文档目录

### API 文档

更新动态

API 简介

检查上云相关接口

互联网医院相关接口

错误码

# API 文档

## 更新动态

最近更新时间：2023-07-25 09:40:04

### 更新修订记录

版本号	更新描述	更新时间
V1.0.7	<ul style="list-style-type: none"><li>上传检查信息 API 增加患者年龄单位字段</li></ul>	2023-06-26
V1.0.0	<ul style="list-style-type: none"><li>PACS 上传检查信息 API 发布</li><li>PACS 上传检查报告 API 发布</li><li>返回云检查二维码 API 发布</li><li>PACS 上传 DICOM 影像 API 发布</li><li>标记删除检查 API 发布</li><li>检查数据对账 API 发布</li></ul>	2021-09-16

# API 简介

最近更新时间：2023-07-25 09:40:04

数智医疗影像平台为医疗客户及合作伙伴提供简单易用的开放能力。通过简单的接口调用，将院内的检查影像、报告、信息上传至影像云平台，并可将云端的二维码、业务信息回传至院内，也可将平台业务与互联网医院业务进行集成，实现远程医疗全场景的互联协作体验。

# 检查上云相关接口

最近更新时间：2023-07-25 09:40:04

## 概述

数智医疗影像平台提供与第三方系统（例如 PACS、RIS）进行对接，从而实现将院内第三方系统的检查信息、影像信息同步到云平台。文本提供的 API 仅适用于前置服务私有化部署时调用使用。

## 参数说明

HTTP 接口通用签名，用如下的签名算法：

$$\{\text{signature}\} = \text{Hmac-Sha256}(\{\text{token}\}, \{\text{appld}\} + \{\text{timestamp}\})$$

参数说明：

- token – 密钥，由腾讯觅影进行分配
- appld – 合作方ID，由腾讯觅影进行分配
- timestamp – 时间戳，当前生成的时间戳，毫秒数
- signature – 生成的密钥签名

所有接口在请求鉴权需要在 http 请求 header 头里面带上相应信息：

- signature 对应 http 协议 header 的 signature 字段
- appld 对应 http 协议 header 的 appld 字段
- timestamp 对应 http 协议 header 的 timestamp 字段

接口参数类型说明：

参数类型	类型说明
A	强制必填，缺失将报错并拒绝接收数据，造成业务无法正常使用
B	存在则必填，缺失仍然可正常接收数据，但会影响业务正常使用
C	非必填，缺失仍然可正常接收数据，但不会影响业务正常使用

## 检查信息上传API

- 触发时机：检查完成时，收到图像则上传检查信息
- 传输协议：HTTPS POST
- 数据交互格式：JSON (Content-Type: application/json)
- 接口地址：https://{host}/ris/study/add（host 为部署前置机 IP）

请求参数：

参数名	类型	是否	参数	备注
-----	----	----	----	----

		必填	类型	
patientId	string	必填	A	患者 ID
patientName	string	必填	A	患者姓名
patientSex	string	必填	A	患者性别， M: 男 F: 女 O: 其他
studyId	string	必填	A	检查 ID
accessNumber	string	必填	A	AccessNumber
modality	string	必填	A	设备类型
patientAge	string	必填	B	患者年龄
patientAgeUnit	string	必填	B	患者年龄单位，Y (岁)，M (月)，D (天)
patientBirthday	string	必填	B	患者生日，yyyy-MM-dd
size	string	必填	B	患者身高(m 单位米)
weight	string	必填	B	患者体重(kg 单位公斤)
phoneNum	string	必填	B	电话号码
medicalInsuranceNum	string	必填	B	医保号
idCardNum	string	必填	B	身份证号
hkAndMarcoPermitNum	string	必填	B	港澳通行证号

passportNum	string	必填	B	护照号
otherInfo	string	必填	B	其他身份信息
homeAddress	string	非必填	C	家庭住址
bodyPart	string	必填	B	检查部位
studyDesc	string	必填	B	检查描述
studyDate	string	必填	B	检查时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss
appointDate	string	非必填	C	预约时间
scanMode	string	必填	B	扫描方式
studyCategory	string	必填	B	检查类别, normal: 平诊, emergency: 急诊
applyDept	string	必填	B	申请科室
applyDoctor	string	必填	B	申请医生
applyDeptId	string	必填	B	申请科室 ID
applyDoctorId	string	必填	B	申请医生 ID
hisNum	string	必填	B	HIS 号
clinicNum	string	非必填	C	门诊号
inpatientNum	string	非必填	C	住院号



healthScreenNum	string	非必填	C	体检号
examDept	string	必填	B	检查科室
examDoctor	string	必填	B	检查医生
examDeptId	string	必填	B	检查科室 ID
examDoctorId	string	必填	B	检查医生 ID
examInfo	string	非必填	C	检查信息(曝光次数、检查费用)
inpatientWard	string	非必填	C	住院病区
bedNum	string	非必填	C	住院床号
diagnosis	string	非必填	C	临床诊断
symptom	string	非必填	C	临床症状
allergies	string	非必填	C	过敏反应
studyRequirement	string	非必填	C	检查需求
equipment	string	非必填	C	检查设备
status	string	必填	B	检查状态, registered: 登记, partial: 初诊, preliminary: 审核, print: 打印, final: 最终状态
studyUid	string	必填	B	检查 Uid
imageCnt	int	必填	B	(数据对账) 图片数

reportCnt	int	必填	B	(数据对账) 结构化报告数
pdfCnt	int	必填	B	(数据对账) pdf 格式报告数
seriesCnt	int	必填	B	(数据对账) 序列数

请求返回:

字段	类型	备注
code	int	标注本次访问是否成功的错误码, 0成功, 非0失败
message	string	错误描述

## 检查报告上传API

- 触发时机: 检查完成报告审核后, 上传报告信息
- 传输协议: HTTPS POST
- 数据交互格式: JSON (Content-Type: application/json)
- 接口地址: [https://\\${host}/ris/report/add](https://${host}/ris/report/add) (host 为部署前置机 IP)

请求参数:

参数名	类型	是否必填	参数类型	备注
reportNumber	string	必填	A	报告号
studyId	string	必填	A	检查 ID
accessNumber	string	必填	A	检查 AccessNumber
imageDescription	string	必填	A	影像描述
conclusion	string	必填	A	诊断结论
reportTime	string	必填	B	初诊时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss
reportDoctor	string	必填	B	初诊医生

auditTime	string	必填	B	审核时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss
auditDoctor	string	必填	B	审核医生
printTime	string	必填	B	打印时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss
printDoctor	string	必填	B	打印医生

请求返回:

字段	类型	备注
code	int	标注本次访问是否成功的错误码, 0成功, 非0失败
message	string	错误描述

## 云检查二维码返回API

- 触发时机: 获取二维码, 并放到患者登记时打印给患者的检查卡
- 传输协议: HTTPS POST
- 数据交互格式: JSON (Content-Type: application/json)
- 接口地址: https://{host}/ris/getStudyQR (host 为部署前置机 IP)

请求参数:

参数名	类型	是否必填	参数类型	备注
studyId	string	必填	A	检查 ID
accessNumber	string	必填	B	检查 AccessNumber
patientId	string	必填	B	患者 ID

请求返回:

字段	类型	备注

code	int	标注本次访问是否成功的错误码，0成功，非0失败
message	string	错误描述
data	struct	数据详情

数据格式：

字段	类型	备注
qrImage	string	二维码图片 Base64 字符串
qrUrl	string	云胶片二维码地址(外网)，该字段为预留字段，暂时为空

结果示例：

```
{
  "code":0,
  "message":"成功",
  "data":{

    "qrImage":"iVBORw0KGgoAAAANSUgAAQAAAAEAAQMAAABmvDoIAAAABIBMVEX
    ///8AAABVwtN+AAADZ0IEQVR42uyYPY68OhDECxE47Bvgi4zgWgRIWCLgWozmluYGDh
    0g11M387GbveC/rIN1sGK8vwDc7urqxt/6W/96DSQfZJ6LT+Owk8cQ09juJEs1QA+4DeK
    WDQzwCfM9cuWe7F8XAZ7rBskzY3KHT1wKGIY98agLeOx0yxPI7T1ivDWXA0UY9IFM5D
    0yoDIAcl8oGT2EW6NR9pjPh6sAu/Z7yIPvZf3y8D0vfhnQ1e7ME2Av71i8rlzfROSHgR6yk
    mQYopBM7hjlc6evBhil8QZxoaGobqilcT28ytpVADzJKG65RwPcQia0pAuoBugh+eZ1XwU
    2wh09mG+fr7gC8Jgfe2KA6icTYGGNyK8rVwEADwwFXDZgPho66udsTbKda4Amyvql4ol
    daUN3NBbN5A7UAzCnTw6Y4BnaAs1NyUMUzNtVAFTbPTEzMrTRACO/RPPXgYbM+ifokW
    52kkR55J4idgEAM1rl6q/yDQJ1fbrzimYNQO9FD1BzU9YH6Za7JijEitQ1AJDc0dnPU1HDGU0
    ht2qAITLoAQJewrDT8X7awle4LwB6b7JpsuBI5qmJadaHt9L+PtBoSpoRpeUFDz1bRvC4DF
    APoxWH2+nxnPqH3KqRqAl4alcTzTbbvVsfEdrsXATYbd+pPSBmtS/znadXfgvl7wMD04gO
    aglloBMuxQu3Dq+SdAUQuVrnfqeEW6c12tsOP8lbA5BVN46Gup80N7lu3bssXgOQRRyLp
    eTZwushvtS+BqBHwIDertx43jSf9Js+vvrHAW1tNp/yBJ/0Fybs7ZOxp17DUAPOYugNaq0
    RkzWR8GXbvGnAZw9sIWc+Xhe+zyUj8mpALC2S5WsQLLa5qVAws0T03WAT7P5K73tVE
    ClQsvOa7pYAXAKLDQlZWURTJqtm7f28CKgiZiPTmPn09gWnOMFFfqploBJvyS3d2JEQ7cU
    n0YTkf4qYKDNinO7qevTsBbYBPvtiisAnlM1BrWm1ogNEeYGI8sAmy4WsXm+U7MX4DG2
    ++dOVgDY5L875wzmBsNwusFPzfp54jXxu2Cuj9SG1KaLGX1VwOYTph4Y4ZknDffWmeR
    eCXsiamA1WI9S+2hBWxFg4Rb1fsxQUrP1wNs2XwCcg30LpE0+rc/Shiu3pRrgb/2t/7/+C
    wAA//+Q7bUC9L1DBAAAABJRu5Erkjggg==",
    "qrUrl":""
  }
}
```

```
}
}
```

## DICOM 影像上传 API

- 触发时机：该检查完成，pacs 获得图像后即上传图像
- 协议：dicom c-store
- 配置：在 PACS 上配置觅影云网关的 AETitle IP Port，在觅影云网关配置 PACS 的 AETitle IP Port

## 标记删除检查 API

- 触发时机：当医院想要删除不显示一些错误的检查时，调用该接口传输检查信息，标记删除影像云上该检查记录
- 传输协议：HTTPS POST
- 数据交互格式：JSON (Content-Type: application/json)
- 接口地址：https://{host}/ris/study/delete (host 为部署前置机 IP)

请求参数：

参数名	类型	是否必填	参数类型	备注
patientId	string	必填	A	待删除 患者 ID
studyId	string	必填	A	待删除 检查 ID
accessNumber	string	必填	A	待删除 检查 AccessNumber
studyUid	string	必填	A	待删除 检查 Uid

请求返回：

字段	类型	备注
code	int	标注本次访问是否成功的错误码，0成功，非0失败
message	string	错误描述

## 检查上传对账API

- 触发时机：定时上报已传检查维度数据以便核验数据的正确性
- 传输协议：HTTPS POST
- 数据交互格式：JSON (Content-Type: application/json)
- 接口地址：https://{host}/ris/reconcilelog (host 为部署前置机 IP)

请求参数:

参数名	类型	是否必填	参数类型	备注
studyId	string	必填	A	检查 ID
accessNumber	string	必填	A	检查 AccessNumber
patientName	string	必填	A	患者姓名
studyUid	string	必填	A	检查 Uid
studyDate	string	必填	A	检查时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss
reportCnt	int	必填	A	结构化报告数
pdfCnt	int	必填	A	pdf 格式报告数
seriesCnt	int	必填	A	序列数
imageCnt	int	必填	A	图片数

请求返回:

字段	类型	备注
code	int	标注本次访问是否成功的错误码, 0成功, 非0失败
message	string	错误描述

## 检查相关ID上报API

- 触发时机: 每天在闲时统一上报一个时间周期内已传检查相关 ID 列表数据
- 传输协议: HTTPS POST
- 数据交互格式: JSON (Content-Type: application/json)
- 接口地址: https://{host}/ris/reconcilerangelog (host 为部署前置机 IP)

请求参数:

参数名	类型	是否必填	参数类型	备注
startTime	string	必填	A	对账时间段开始时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss
endTime	string	必填	A	对账时间段结束时间, yyyy-MM-dd

				hh:mm:ss
studyList	Array(StudyLog)	必填	A	检查相关 ID 的数据组

### studyList数组里面StudyLog的结构

参数名	类型	是否必填	参数类型	备注
studyId	string	必填	A	检查 ID
accessNumber	string	必填	A	检查 AccessNumber
studyUid	string	必填	A	检查 Uid
studyDate	string	必填	A	检查时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss
reportCnt	int	必填	A	结构化报告数
pdfCnt	int	必填	A	pdf 格式报告数
seriesCnt	int	必填	A	序列数
imageCnt	int	必填	A	图片数

请求返回:

字段	类型	备注
code	int	标注本次访问是否成功的错误码, 0成功, 非0失败
message	string	错误描述

# 互联网医院相关接口

最近更新时间：2023-07-25 09:40:04

## 概述

数智医疗影像平台提供与互联网医院进行集成，实现用户在互联网医院进行检查、报告、影像的信息同步和业务交互。

## 参数说明

HTTP 接口通用签名，用如下的签名算法：

$$\{\text{signature}\} = \text{Hmac-Sha256}(\{\text{token}\}, \{\text{appld}\} + \{\text{timestamp}\})$$

参数说明：

- token – 密钥，由腾讯系统分配
- appld – 合作方ID，由腾讯系统分配
- timestamp – 时间戳，当前生成的时间戳，毫秒数
- signature – 生成的密钥签名

所有接口在请求鉴权需要在 http 请求 header 头里面带上相应信息：

- signature 对应 http 协议 header 的 signature 字段
- appld 对应 http 协议 header 的 appld 字段
- timestamp 对应 http 协议 header 的 timestamp 字段

## 检查列表查询 API

- 使用场景：患者查询在院内完成的检查信息（根据请求参数数据用途 usage 字段来区分具体使用场景）
- 协议：HTTPS
- 地址：<https://pacs.qq.com/thirdparty/patientStudies/{appld}>
- 数据交互格式：JSON (application/json)
- 使用流程：- 患者检查列表查询 - 会诊拉取患者检查信息 - 选择添加检查信息的候选列表，根据请求参数数据用途(usage)字段来区分具体使用场景

请求参数：

参数名	类型	是否必填	备注
phoneNum	string	是	患者电话号码，算法(AES-256-ECB + HEX)来加密字段，密钥与签名 token 相同(32位)
idNum	string	是	患者身份证号，算法(AES-256-ECB + HEX)来加密字段，密钥与签名 token 相同(32位)



hisId	string	否	医院信息系统 ID, HIS 号, 如果有则填写
patientName	string	否	患者姓名
hospitalId	string	是	医院 ID(腾讯觅影影像云系统医院 ID)
unionId	string	是	医联体 ID(腾讯觅影影像云系统医联体 ID)
studyType	int	是	检查类型, 0: 放射 1: 眼科 2: 病理 3: 内镜 4: 心电 5: 超声
dataFlag	int	是	数据标识, 0: 展示该患者全部的数据 1: 仅展示本院来源的数据 (根据医院ID) 2: 展示除本院以外的数据 (根据医院ID) 3: 仅展示当前医联体来源的数据 (根据医联体ID) 4: 展示除当前医联体以外的数据 (根据医联体ID)
usage	int	是	数据用途, 0: 患者查看检查列表 1: 患者在线咨询场景 2: 医生查看患者详情
studyDateBegin	string	是	检查时间查询开始时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss
studyDateEnd	string	是	检查时间查询结束时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss

请求返回:

字段	类型	备注
code	int	标注本次访问是否成功的错误码, 0成功, 非0失败
message	string	错误描述
data	list(Study)	数据详情, JSON 列表

检查数据格式:

字段	类型	备注
hisId	string	医院信息系统 ID, HIS 号
reportId	string	影像云返回 reportId
studyType	int	检查类型, 0: 放射 1: 眼科 2: 病理 3: 内镜 4: 心电 5: 超声
studyDate	string	检查时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss
studyId	string	检查号, 检查 ID
bodyPart	string	检查部位
studyName	string	检查项目
applyDoctor	string	申请医生
applyDoctorId	string	申请医生 ID
applyDept	string	申请科室
applyDeptId	string	申请科室 ID
uniAppId	string	跳转小程序 appId
uniPath	string	检查详情, 小程序跳转路径带参数
h5Url	string	检查报告详情, h5跳转 URL
h5DetailUrl	string	检查影像详情, h5跳转 URL

## 会诊记录查询 API

- 使用场景: 医生查询远程会诊记录
- 协议: HTTPS

- 地址：[https://pacs.qq.com/thirdparty/patientConsultations/\\${appld}](https://pacs.qq.com/thirdparty/patientConsultations/${appld})
- 数据交互格式：JSON (application/json)

请求参数：

参数名	类型	是否必填	备注
hisId	string	是	医院信息系统 ID, HIS 号
phoneNumber	string	是	患者电话号码, 算法(AES-256-ECB + HEX)来加密字段, 密钥与签名 token 相同(32位)
idNum	string	是	患者身份证号, 算法(AES-256-ECB + HEX)来加密字段, 密钥与签名 token 相同(32位)
patientName	string	否	患者姓名
hospitalId	string	是	医院 ID(腾讯觅影影像云系统医院 ID)
unionId	string	是	医联体 ID(腾讯觅影影像云系统医联体 ID)

请求返回：

字段	类型	备注
code	int	标注本次访问是否成功的错误码, 0成功, 非0失败
message	string	错误描述
data	struct	数据详情

数据格式：

字段	类型	备注
h5Url	string	患者的会诊列表, h5跳转 URL

## 检查报告 URL 获取 API

- 协议：HTTPS
- 地址：[https://pacs.qq.com/thirdparty/patientReportUrl/\\${appld}](https://pacs.qq.com/thirdparty/patientReportUrl/${appld})
- 数据交互格式：JSON (application/json)
- 使用流程：在影像云跳转第三方小程序后, 通过 reportId 获取影像云报告 url

请求参数：

参数名	类型	是否必填	备注
reportId	string	是	影像云返回 reportId
phoneNum	string	是	患者电话号码，算法(AES-256-ECB + HEX)来加密字段，密钥与签名 token 相同(32位)
idNum	string	是	患者身份证号，算法(AES-256-ECB + HEX)来加密字段，密钥与签名 token 相同(32位)
hospitalId	string	是	医院 ID(腾讯觅影影像云系统医院 ID)

请求返回：

字段	类型	备注
code	int	标注本次访问是否成功的错误码，0成功，非0失败
message	string	错误描述
data	PatientStudyUrl	数据详情，JSON 对象

PatientStudyUrl 数据格式：

字段	类型	备注
h5Url	string	检查报告详情，h5跳转 URL
h5DetailUrl	string	检查影像详情，h5跳转 URL
studyId	string	检查号，检查 ID，与医院系统对齐

## 检查状态同步回调 API

- 使用场景：在云平台获取收到影像检查信息、报告信息和图片信息时，会回调合作方的接口，以同步影像云状态信息，方便公众号推送模板消息
- 协议: HTTPS
- 地址: 合作方定义
- 数据交互格式：JSON (application/json)

请求参数：

参数名	类型	是否	备注
-----	----	----	----

		必填	
status	int	是	0: 仅获取到检查信息 1: 已获取到报告 2: 已获取到图片 3: 已获取报告和图片
phoneNum	string	是	患者电话号码, 算法(AES-256-ECB + HEX)来加密字段, 密钥与签名 token 相同(32位)
idNum	string	是	患者身份证号, 算法(AES-256-ECB + HEX)来加密字段, 密钥与签名 token 相同(32位)
patientId	string	是	患者 ID
hospitalId	string	是	医院 ID(腾讯觅影影像云系统医院 ID)
hisId	string	否	医院信息系统 ID, HIS 号, 如果有则填写
studyType	int	是	检查类型, 0: 放射 1: 眼科 2: 病理 3: 内镜 4: 心电 5: 超声
studyDate	string	是	检查时间, yyyy-MM-dd hh:mm:ss
studyId	string	是	检查号, 检查 ID
bodyPart	string	否	检查部位, 如果有则填写
studyName	string	否	检查项目, 如果有则填写
h5Url	string	是	检查报告详情, h5跳转 URL
h5DetailUrl	string	是	检查影像详情, h5跳转 URL
reportId	string	是	返回的 reportId, 用于患者检查报告 URL 获取

请求返回:

--	--	--

字段	类型	备注
code	int	是否成功接收请求，0成功，非0失败
message	string	错误描述

# 错误码

最近更新时间：2023-07-31 10:25:52

错误码	说明
0	请求成功
1	内部其他错误
100001	参数错误
100002	数据保存失败
100003	数据同步失败
100004	没有找到数据
10001	文件保存失败
10002	文件删除失败
10003	未找到数据
10004	数据重复
10005	数据不合法
20001	验证码错误
20002	验证码已过期
20003	今日获取验证码次数已达上限
20004	尝试次数已达上限
20005	账号身份验证已过期
20006	账号身份验证失败
20007	该账号在其他设备上登录，请重新登录
20008	该用户无权限
20009	分享链接已失效
20010	用户被禁用

20011	用户未绑定手机号
20012	该用户不是管理员
20013	用户已存在
20014	用户不存在
20015	该机构名称已被使用
20016	机构不存在
20017	分享需要密码或者密码不正确
20018	医联体名称已存在
20019	科室名称存在
20020	设备名称已存在
20021	设备类型名称已存在
20022	分享无权访问，请重新扫码
20023	医联体不存在
20024	科室不存在
20025	设备不存在
20026	设备类型不存在
20027	医生已存在
20028	医生不存在
20029	已提交过申请
20030	格式不合法
20031	必填参数为空
20032	无效企业微信userID
30001	查询报告失败
30002	检查ID不存在
30003	报告不存在



30004	报告已存在
30005	新建报告失败
30006	报告已被修改
30007	更新报告失败
30008	未找到该检查
30009	没有权限查看该检查
30010	报告被锁定
30011	无法解锁报告
30012	检查部位存在
30013	检查部位不存在
30014	检查项目存在
30015	检查项目不存在
40001	GenSig失败
40002	LIVEROOM查询失败
40003	LIVEROOM修改失败
40004	LIVEROOM取消失败
40005	LIVEROOM找不到
40006	LIVEROOM创建失败
40007	群聊创建失败
40008	会议已开始，修改失败
40009	会议已开始，取消失败
40010	填写会议总结锁定失败
40011	邀请专家的数量超过限制
50001	成员数达到最大限制
50002	成员不存在或没权限

50003	成员身份证号码错误
50004	成员扫码超过每日限制
50005	成员身份证号码错误
50006	成员身份证不匹配
60001	删除知识库内容失败
60002	文件夹已存在
60003	文本标题已存在
60004	文件夹名称或者文本标题不能为空
60005	该模块已经被删除
60006	超出层级限制
70001	患者查询失败
80001	用户查询失败
90001	无效 token
90002	无效签名
90003	超出最大获取次数